



NJEŽAN I SNAŽAN KAO MAJČINA LJUBAV

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o medicinskom sredstvu.
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima
na medicinsko sredstvo posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

EFFIGERM
Wound Wash

Dragi roditelji, čestitamo na dolasku vaše prekrasne bebe!

Rođenje djeteta je neprocjenjiv trenutak i jedna od najemotivnijih uspomena u životu svake porodice. Od sada je sve drugačije, svijet gledate novim očima, a pored vas je jedno malo biće koje vam mijenja život.

S bebom dolaze i neke nove brige, no uz nekoliko korisnih savjeta, možete se opustiti u ovoj novoj ulozi.

Novorođenče se prilagođava vanjskom svijetu, a njegov imunitet tek počinje jačati.



U nekim situacijama potrebno je zaštititi bebinu osjetljivu kožu, na kojoj mogu biti prisutne ranice i oštećenja, što je potpuno normalno u periodu nakon poroda.

Uz ovu brošuru, želimo vam pružiti korisne savjete za bezbrižno uživanje u prvim trenucima roditeljstva, a Effigerm Wound Wash može vam pomoći u njezi osjetljive kože vaše bebe, pružajući sigurno i nježno rješenje.



*Nježan i snažan
kao majčina ljubav*

Za što se koristi Effigerm Wound Wash?

NJEGA PUPKA

U prvim sedmicama nakon poroda, posebnu pažnju treba posvetiti djetetovom pupku. Preostali dio pupkovine, tzv. pupčani batrljak, najčešće otpadne u prve 2 sedmice nakon rođenja. Nakon otpadanja, ostaje pupčana ranica na kojoj počinje proces zacjeljivanja.



Ne sadrži alkohol

Zahvaljujući tome što ne sadrži alkohol, Effigerm je posebno nježan prema osjetljivoj koži vaše bebe.



POSTUPAK ČIŠĆENJA BEBINOG PUPKA



1

Pažljivo
operite ruke

2

Uklonite staru gazu, a zatim
sterilnom kompresom, blago
navlaženom Effigerm Wound
Washom, nježno očistite kožu
oko pupka i područje dna pupka

3

Uzmite novu gazu navlaženu
Effigerm Wound Washom
i laganim tapkanjem očistite
pupčani batrljak

4

Na kraju, prekrijte
pupčani batrljak
novom, čistom i suhom
sterilnom gazom



OGREBOTINE

Djetetovi noktići su mekani, ali mogu već pri rođenju biti tanki i oštri. Postoje preporuke o rezanju djetetovih noktiju tek nakon nekoliko sedmica, a do tada se beba često ogrebe dok giba ručicama. Ako dijete napravi ranicu češanjem, možete je tretirati Effigerm Wound Wash tekućinom. Tako će se osigurati sigurno zarastanje rane i pomoći u bržem zacjeljivanju.

PELENSKI OSIP

Pelenski osip je čest i uobičajen oblik upale kože na pelenskom području. Uzroci su brojni, postoje blaže i intenzivnije iritacije, a okarakterisano je crvenilom i vidljivim ranicama na koži.

Kako je područje s ranicama često prekriveno vlažnom pelenom, preporučljivo je, prilikom higijene, ranu tretirati Effigerm Wound Wash tekućinom kako bi se spriječila infekcija i osigurali optimalni uvjeti za prirodno zacjeljivanje.



NJEGA MAJKE

Iako je većina vašeg vremena posvećena vašoj bebi, važno je da ne zaboravite na svoje potrebe nakon poroda. Za lakši oporavak, Effigerm Wound Wash može pružiti nježnu i sigurnu njegu na područjima koja trebaju posebnu pažnju i zacjeljivanje.



ZA CIJELU PORODICU

Effigerm je tu za bebu, mamu i tatu, pomaže i seki, braci, djedu i baki. Uvijek pri ruci za svakodnevne nezgode, nježno čuva sve, u svakoj torbi neizostavan je.





EFFIGERM Wound Wash otopina za čišćenje, ispiranje i vlaženje rana

KORISTI SE ZA:

- ✕ Tretiranje manjih ogrebotina
- ✕ Razderotina
- ✕ Iritacija
- ✕ Posjekotina
- ✕ Primjenu na neoštećenoj koži

EFFIGERM Wound Wash

FORMULACIJE

- 👉 Efikasnost hipohloraste kiseline
- 🚫 Prevenција stvaranja biofilma
- 🕒 Djeluje od prvih minuta
- 👶 Siguran od rođenja (0+)

- 🚫 Bez alkohola (nježan u trenutku nanošenja)
- 👶 Hipoalergen
- 🧪 Dermatološki testiran

ČISTI · ŠTITI · SPRJEČAVA INFEKCIJE · POSPJEŠUJE ZACJELJIVANJE RANA



**Siguran od
rođenja**



Ne sadrži alkohol



Snaga hipohloraste kiseline



Dermatološki ispitan

